

PULIZIA, MANUTENZIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO KIACCESSORI®

Pulizia, manutenzione e sterilizzazione dello strumentario KIACCESSORI®

- ☒ Per diminuire il rischio di infezioni crociate, indossare sempre i guanti di protezione durante la pulizia, manutenzione e sterilizzazione degli strumenti.
 - ☒ Non utilizzare apparecchi ad ultrasuoni.
 - ☒ **GLI STRUMENTI E LE TURBINE KIACCESSORI VANNO LUBRIFICATI DUE VOLTE AL GIORNO E SEMPRE PRIMA DI OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE**
 - ☒ Prima di iniziare a lavorare, scollegare il manipo dal attacco e rimuovere la fresa dal mandrino
 - ☒ **Il funzionamento degli strumenti KIACCESSORI è garantito anche dalla lubrificazione del morsetto 2 volte a settimana utilizzando l'apposito spray.**
 - ☒ Non immergere gli strumenti in soluzioni disinfettanti.
 - ☒ Prima di ogni ciclo di sterilizzazione assicurarsi che gli strumenti siano stati opportunamente puliti e lubrificati.
- Al termine del programma togliere immediatamente gli strumenti dallo sterilizzatore

- ☒ To decrease the risk of cross infection, always wear protective gloves when cleaning, maintenance and sterilization.
 - ☒ Do not use ultrasonic equipment.
 - ☒ **THE KIACCESSORI INSTRUMENTS AND HANDPIECES MUST BE LUBRICATED BEFORE STERILIZATION TWICE A DAY.**
 - ☒ Before starting work, disconnect the handpiece from the coupling and remove the bur from the chuck.
 - ☒ **The operation of the KIACCESSORI® instruments is guaranteed also by the lubrication of the clamp one time per week using the appropriate spray.**
- Do not immerse instruments in disinfecting solutions.
- ☒ Before each sterilization to ensure that the instruments are properly cleaned and lubricated.

ISTRUZIONI step-by-step

1. Rimuovere delicatamente la fresa
 2. Applicare la turbina sul beccuccio della bomboletta olio spray KIACCESSORI e spruzzare per un secondo, ripetere il processo in presenza di sporco ostinato, non usare altri lubrificanti.
 3. Sterilizzare strumenti e testine imbustati in autoclave fino ad una temperatura max di 135°C.
terminato il programma, togliere immediatamente le turbine dall'apparecchio per evitare malfunzionamenti.
 4. Prima dell'utilizzo collegare la turbina all'attacco, farla funzionare per qualche secondo per eliminare l'olio in eccesso
1. Remove the bur carefully.
 2. Aim the spray nozzle of KIACCESSORI oil spray at the handpiece and spray for a second.
repeat the process in the presence of stubborn dirt, do not use other lubricants.
 3. Sterilize instruments and heads packed and sterilization (autoclave) up to a temperature of max 135 ° C.
Once finish the sterilization, remove the handpiece from the apparatus immediately to avoid malfunction.
 4. Before use, connect the handpiece to the coupling, run it for a few seconds to remove excess oil